



**مراقب شنوایی شما، در هر شرایطی**

Nodio™

### محافظ گوش Nodio

با Nodio™، آسایش و سلامت شنوایی شما در اولویت است. چه در محیط‌هایی پر سروصدا کار می‌کنید، چه اهل کنسرت، سفر یا خواب عمیق هستید، Nodio™ همراه مطمئنی برای محافظت از گوش‌های شماست.

- کاهش مؤثر صداهای مزاحم.
  - طراحی ارگونومیک و راحت برای استفاده طولانی‌مدت
  - مناسب برای همه، شاغلین کارگاه‌های صنعتی، دانش‌آموزان، موسیقی‌دانان و...
  - قابل شست‌وشو و چند بار مصرف
  - در سایزهای متنوع برای تناسب بهتر در مجرای گوش
- Nodio™ با بهره‌گیری از فناوری روز و مواد باکیفیت، به شما کمک می‌کند تا بدون آسیب به سیستم شنوایی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی‌تان را حفظ کنید.



parstek.ir - fanaz.com  
parstek.hearing  
fannazarakhsh

فن آذرخش  
دانش بنیان و نوآور

## تمیز کردن محافظ گوش Nodio™

محافظ‌های گوش Nodio™ دارای فیلتر مخصوصی هستند که در صورتی که به صورت صحیح تمیز نشوند، ممکن است آسیب ببینند. برای افزایش طول عمر آن‌ها، نکات زیر را اجرا نمایید:

- سر سیلیکونی را از Nodio™ جدا کرده و جداگانه تمیز نمایید. 
- همه چیز را به آرامی با یک پارچه مرطوب و آب و صابون پاک کنید. 
- قبل از نصب مجدد سر سیلیکونی، همه چیز را با دقت خشک نمایید. 
- Nodio™ را در آب فرو نکنید و از مواجهه با مواد شیمیایی قوی یا اشیاء تیز خودداری نمایید. 

## یافتن اندازه مناسب

Nodio™ در ابتدا با سری سیلیکونی سایز متوسط عرضه می‌شود.

اگر سایز سری سیلیکونی شما کوچک است و به راحتی از مجرای گوش بیرون می‌آید، سایز بزرگتر انتخاب کنید.  
اگر سایز سری سیلیکونی شما بزرگ است و بیرون از گوش قرار می‌گیرد، سایز کوچک‌تر انتخاب کنید.



**نکته:** هنگام حرکت دادن فک خود از یک طرف به طرف دیگر، مطمئن شوید که Nodio™ محکم در جای خود باقی می‌ماند.

**به یاد داشته باشید:** هر گوش منحصر به فرد است و گوش‌های راست و چپ شما ممکن است به اندازه‌های مختلفی از سری‌های سیلیکونی نیاز داشته باشند. این فرآیند را برای هر گوش تکرار کنید تا اندازه ایده‌آل خود را پیدا کنید.

## سری سیلیکونی Nodio™ را عوض کنید

در آوردن:



۱  
سری سیلیکونی را  
به سمت بیرون  
بچرخانید.



۲  
به آرامی آن را  
بکشید.

جای زدن:



۳  
سری سیلیکونی جدید  
را به سمت داخل  
برگردانید و به آرامی  
آن را در جای خود  
فشار دهید.



۴  
آفرین!  
شما Nodio™  
آماده‌ی قرار  
گرفتن در  
گوش است.

## قرار دادن Nodio™ در کانال گوش

Nodio™ باید به صورت صحیح در کانال گوش قرار گیرد تا بهترین عملکرد خود را داشته باشد. برای رسیدن به سطح مورد نظر از کاهش نویز، مراحل زیر را دنبال کنید.



۱  
سری سیلیکونی را  
داخل کانال گوش  
قرار دهید.



۲  
Nodio™ را به سمت  
عقب بچرخانید.



۳  
مطمئن شوید کاملاً  
در گوش قرار گرفته  
باشد.

**نکته:** وقتی صدای خودتان هنگام صحبت بلندتر به نظر می‌رسد، نشان دهنده‌ی قرار گرفتن کامل در گوش است.